



STARMed

Rendimenti VentuPlus Quieto ***VentuPlus Quieto Performance***

Pressione di Esercizio - *Operating Pressure*

MIN 3 - MAX 3,5 BAR

RICHIESTA REQUIREMENT		IMPOSTA SETTING			AL PAZIENTE TO PATIENT
FiO ₂ (±5%)	PEEP cmH ₂ O	FLUSSO O ₂ FLOW Ⓐ + Ⓑ			FLUSSO FLOW L/min (±8%)
40%	5	13	+	0	65
	7.5	13	+	0	62
	10	13	+	0	58
	12.5	13	+	0	55
	15	14	+	0	57
	20	15	+	0	57
50%	5	10	+	10	62
	7.5	11	+	10	63
	10	12	+	10	63
	12.5	12	+	10	61
	15	13	+	10	62
	20	14	+	10	61
60%	5	8	+	18	60
	7.5	9	+	18	61
	10	10	+	18	63
	12.5	11	+	18	64
	15	12	+	18	64
	20	13	+	18	61



RICHIESTA REQUIREMENT		IMPOSTA SETTING			AL PAZIENTE TO PATIENT
FiO ₂ (±5%)	PEEP cmH ₂ O	FLUSSO O ₂ FLOW Ⓐ + Ⓑ			FLUSSO FLOW L/min (±8%)
70%	5	5	+	30	61
	7.5	6	+	30	60
	10	8	+	26	60
	12.5	9	+	26	63
	15	10	+	24	62
	20	12	+	22	60
100%	<p>Per il trattamento ad ossigeno puro collegare entrambi i tubi a fonti di ossigeno, chiudere il sistema Venturi ed alimentare con flusso minimo di ossigeno pari a 40 L/min.</p> <p><i>For 100% oxygen treatment connect both tubes to oxygen sources and close the Venturi valve. Feed with a minimum oxygen flow of 40 L/min.</i></p>				